

RHINITIX

HU

orspray 10 ml
Használati útmutató



Tartalom:

1. Mi a Rhinitix és mire használható?
2. A Rhinitix termék használatát megelőző fontos információk
3. Hogyan használja a Rhinitix terméket?
4. Lehetséges mellékhatások.
5. Hogyan tárolja a Rhinitix terméket?
6. További információk

Összetevők: tisztított víz, szójabab olaj, glicerin, xilit, emulgeálószer, kappá karragén, fukoidán, totarol, tokoferol-acetát, nátrium-citrát-dehidrát, EDTA nátriumsó, szibériai fenyőolaj

1. Mi a Rhinitix és mire használható?

A Rhinitix egy, a vírusos és bakteriális orrnyálkahártya fertőzések, valamint az allergiás orrnyálkahártya gyulladás kezelése során nyugtató és támogató hatással bíró orvostechikai eszköz. A Rhinitix megelőző kezelésként is használható az orrnyálkahártya fertőzés fokozott kockázatának időszakában. A termék összetevői filmréteggel fedik le az orrnyálkahártyát, korlátozva az allergének, baktériumok és vírusok, így például a rhinovírusok és a koronavírusok megtapadását, behatolását és elterjedését. A Rhinitix szintén támogatja az irritált nyálkahártya helyreállítását. A tixotrópikus tulajdonságok megelőzik, hogy a termék az orrnyálkahártya felületéről lefolyjon.

A Rhinitix fő összetevői a kappá karragén és a fukoidán. A kappá karragén és a fukoidán vírusellenes szerkezete a sejtfelszínen található receptorok elzárásán és a megtapadás csökkentésén alapul. A kappá karragén és a fukoidán akadályt képez a nyálkahártya felületen, ezáltal megakadályozza a vírus és a sejtfelszín kölcsönhatását. A termék továbbá tartalmaz xilitet, mely megakadályozza a betegség okozó baktériumok megtapadását és növekedését az orrgarati hámszöveti sejtek felszínén.

Mitől más a Rhinitix?

Az egyedi tixotrópikus tulajdonságoknak köszönhetően, a Rhinitix egy hidratáló védő filmréteget hoz létre az orrnyálkahártya felületén. Ez a réteg akadályként védi az orrüreg belsejét a külső tényezőktől. A készítmény összetevői megakadályozzák a baktériumok megtapadását és a rhinovírusok és koronavírusok orrnyálkahártyába történő behatolását, amik az orrnyálkahártya fertőzések fő okozói. Mindez segítheti csökkenteni a gyógyszeres kezelést szükségességét a vírusos orrnyálkahártya

fertőzés esetében és csökkentheti a másodlagos bakteriális fertőzés kockázatát.

Javasolt felhasználás:

- Használata már a megfázás és az influenza-szerű tünetek kezdeti stádiumaiban javasolt
- Támogatás a vírusos és bakteriális orrnyálkahártya fertőzések, valamint az allergiás orrnyálkahártya gyulladás kezelése során
- Megelőző intézkedés az orrnyálkahártya fertőzés fokozott kockázatának időszakában.

2. A Rhinitix termék használatát megelőző fontos információk

Ellenjavallatok és megelőzés:

Ne használja a Rhinitix terméket:

- ha a csomagolás sérült vagy a csomagolásra nyomtatott lejárati dátum eltelt
- ha a termék bármely összetevőjével szembeni allergia került korábban megállapításra
- ha orrvérzés vagy az orrüregben sérülés figyelhető meg
- közvetlenül az orrgarati üregben végrehajtott műtetet, illetve sebészeti eljárást követően
- **1 évnél fiatalabb gyermeknél**

A szemmel, füllel, szájaj vagy a torok nyálkahártyával történő érintkezés elkerülendő. Ha véletlenül a termék szemre, orrra vagy szájon történő alkalmazására került sor, hideg vízzel alaposan öblítse ki.

Habár a Rhinitix terheesség, illetve szoptatás alatt történő használata során felmerülő negatív hatásra vonatkozóan nem áll rendelkezésre bizonyíték, a Rhinitix használata a kezelőorvossal történő egyeztetés alapján javallott.

Más gyógyszerekkel/orvostechikai eszközökkel fennálló kölcsönhatás:

A véráldadagsgátló tulajdonságának köszönhetően a fukoidánnak lehet kiegészítő hatása a véráldadagsgátlókra, mint például a warfarinra és heparinra. A termék használatát követő legalább 30 percben semmilyen gyógyszer, orvostechikai eszköz vagy orrcsepp használata nem javallott.

3. Hogyan használja a Rhinitix terméket?

Adagolás:

Orrnyílásonként naponta legalább 3 alkalommal egy adag Rhinitix alkalmazandó.

Felnőttek és 1 év feletti gyerekek: 1 adag orrnyílásonként napi 3 alkalommal.

Ha nincs javulás 7 nap után vagy rosszabbul érzi magát, konzultáljon a kezelőorvosával.

Gyerekeknek a Rhinitix felnőtt felügyelete mellett adható.


Szükség esetén a Rhinitix használata hosszabb időn keresztül lehetséges. A Rhinitix nem gyógyszerkészítmény, ha a tünetek 7 napnál tovább tartanak, kérjük, egyeztessen orvossal.

Higiéniai okokból és a baktériumok átvitelének megakadályozása érdekében, egy Rhinitix csomagot kizárólag egy ember használjon.

Használati útmutató:

A Rhinitix orrspray kizárólag az orrüregben történő helyi használatra került kivitelezésre.

1. Használat előtt alaposan tisztítsa ki az orrát.
2. Az összetevők összekeverése érdekében, a csomagolást függőlegesen tartva, erősen rázza meg az üveget nagyjából 15 másodpercig (A ábra), távolítsa el a védőkupakot (B ábra) és nyomja meg a pumpát 3-4 alkalommal, amíg a termék az applikátorban megjelenik vagy a Rhinitix permet kiáramlik (C ábra).
3. Finoman helyezze a szórófejet az orrába (ne túl mélyen! D ábra). Az ellentétes orrnyílást zárva tartva, permetezzen egy adagot mindegyik nyílásba.
4. Használatot követően tisztítsa meg az applikátort és zárja vissza a csomagolást a védőkupakkal.

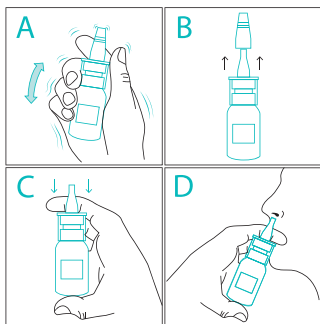

4. Lehetséges mellékhatások

Mellékhatásokra vonatkozóan nem került tanulmány lefolytatásra. Allergia vagy más mellékhatás esetén hagyja abba a Rhinitix orrspray használatát és amint lehetséges, egyeztessen orvosával.

5. Hogyan tárolja a Rhinitix terméket?

A Rhinitix száraz, hűvös helyen 15-25°C között, függőleges helyzetben, az eredeti csomagolásában tárolandó. Napfénytől védendő.

Ne fagyassza le vagy tárolja hűtőszekrényben. Gyerekektől távol tartandó.

Használat után a helyi szabályozásnak megfelelően ártalmatlanítsa a csomagolást.

6. További információ

A Rhinitix az I. osztályba sorolt orvostechnikai eszköz.

Csomagolás:

10 ml többadagos tartály, mely 200 darab felhasználható adagot tartalmaz.

A tartály nincs nyomás alatt.



EmergoPharm SP.z o.o. Sp.K
ul. Józefa Piłsudskiego 11
05-510 Konstancin-Jeziorna, Lengyelország

A használt jelképek magyarázata



a használati útmutatóra hivatkozás



gyártó



figyelmeztetés



CE megfelelőség jelzés



sorozatszám



a megengedett tárolási hőmérséklet korlátozása



napfénytől védendő



ne használja, ha a csomagolás sérült



lejárati dátum

A használati útmutató utolsó felülvizsgálatának dátuma:
10.2020A_FI/SE/HU_IFU